



MEMOBAG

Ein Extraktionsbeutel mit Memory-Effekt

ÜBERBLICK

- deutlich reduziertes Kontaminationsrisiko
- transparent, undurchlässig, reißfest und damit sicher und leicht zu handhaben
- für alle laparoskopischen Eingriffe geeignet: XL-Beutel ermöglicht die Entfernung auch größerer Resektate
- mehr Flexibilität und höhere Wirtschaftlichkeit, da kein zusätzlicher Trokar erforderlich
- farbcodiert für eindeutige Unterscheidung der Größen

RUNDUMSICHERHEIT – EXKLUSIV BEI TELEFLEX 1200-ML-EXTRAKTIONSBEUTEL

Der einzigartige Rüsche MemoBag – ein intelligenter Extraktionsbeutel von Teleflex für die Entfernung von Resektaten – schützt vor Kontaminationen im Operationsfeld und hilft, im Falle von malignen Tumoren, die Streuung von Tumorzellen zu vermeiden.

Unser Sortiment an verschiedenen Größen ermöglicht Ihnen die Durchführung sämtlicher Eingriffe, von der Appendektomie bis zur Nephrektomie. Alle drei Größen des Beutels (von 5 cm bis 13 cm Durchmesser) können über einen 10-mm-Trokar eingebracht werden. Dies ermöglicht ein erhöhtes Maß an Sicherheit, mehr Flexibilität und eine einfachere Handhabung während des gesamten minimal-invasiven Eingriffs.

Zu dem ist unser MemoBag sehr wirtschaftlich, da der 10-mm-Trokar für alle Größen verwendet werden kann.

INDIKATIONEN FÜR DIE ENDOSKOPISCHE CHIRURGIE

- Operative Eingriffe am Kolon
- Appendektomie
- Cholezystektomie
- Splenektomie
- Zystektomie
- Lymphadenektomie
- Adrenalektomie
- Nephrektomie
- Prostatektomie
- Myomektomie
- Ovarialzystektomie
- Extrauterin gravidität
- Hysterektomie
- Operative Eingriffe am Thorax



EINBRINGEN

Der zusammengerollte MemoBag öffnet sich automatisch, nachdem er über den 10-mm-Trokar in das Operationsfeld eingebracht und der Schieber betätigt wurde.




ÖFFNEN

In die Oberkante des MemoBag ist ein Nitinol-Zugdraht mit Memory-Effekt integriert, der unmittelbar nach Öffnen des Beutels automatisch in seine ursprüngliche runde Form zurückspringt und den Beutel geöffnet hält. Der Trokar kann dann, nach Entfernung der MemoBag-Hülse zum Einbringen anderer Instrumente verwendet werden.




BEFÜLLEN

Das Resektat kann dank der großen Öffnung problemlos in den transparenten, undurchlässigen und reißfesten MemoBag eingebracht werden. Falls erforderlich, können größere Resektate ohne Kontaminationsrisiko direkt im Beutel zerkleinert werden.

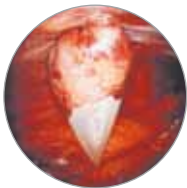

ENTNEHMEN

Anschließend kann der MemoBag zuverlässig verschlossen und entfernt werden.

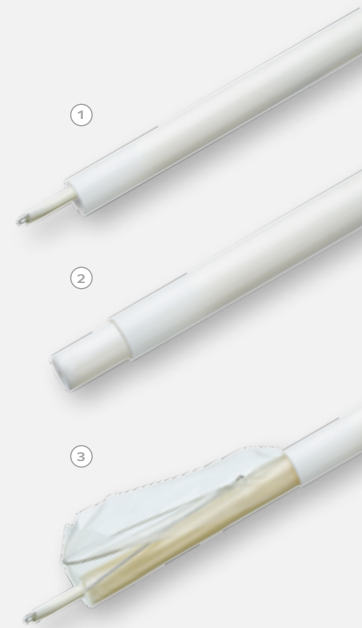

- ① das Extraktions-Set wird über den Trokar eingebracht.
- ② der MemoBag liegt zusammengerollt im Einführrohrchen.
- ③ durch Betätigung des Schiebers wird der Beutel freigegeben und automatisch geöffnet.

BESTELLINFORMATIONEN

MEMOBAG		RÜSCH			
	ART. NR.	GRÖÖSE / VOLUMEN	Ø EXTRAKTIONSBEUTEL	Ø TROKAR	VE
	332800-000010	200 ml	50 mm	10 mm	5 St./Pk.
	332801-000020	800 ml	100 mm	10 mm	5 St./Pk.
	332800-000030	1200 ml	130 mm	10 mm	5 St./Pk.

VERTRIEB DURCH:

TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 05 35 - 00 00 00 · REV A · 07 12 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

teleflex